

歐克博優

血糖監測系統

許可證字號：衛部醫器製字第 008366 號
血糖儀型號：OK-8DLJH(B)

使用說明書



IVD	本產品為體外診斷用		警語，請參閱附件說明
	使用前請先詳閱說明書		保存溫度範圍
	請勿重複使用		保存期限
LOT	試片批號		製造業者

歐克博優 -Ok Pro-UG T-FEB25

OKB 醫療器材商 / 製造業者名稱：訊映光電股份有限公司
醫療器材商 / 製造業者地址：新竹市東區埔頂里公道五路二段 91 號、91 號 2 至 6 樓
E-mail：service@okbiotech.com
網址：www.okbiotech.com

開始使用本產品

感謝您選購本產品血糖監測系統。本產品適用於專業人員及糖尿病患者。

注意：本使用說明書詳細說明歐克博優血糖儀的操作程序與注意事項。為了確保您正確操作並測得準確的血糖值，在您開始使用血糖儀之前，請先詳細閱讀此使用說明書。如有任何問題，請與您當地經銷商或與我們的客服人員聯絡。

△重要安全說明，使用前請先詳閱與遵照以下注意事項：

- 當本產品在孩童、殘障病患附近使用時，務須密切監控使用狀況。
- 僅依據本使用說明書所述之使用目的使用本產品。
- 切勿使用非原廠供應的血糖試片與葡萄糖品管液。
- 如本產品功能異常或有任何損壞時，請先暫停使用，並馬上與我們客服人員聯絡。
- 首次使用本產品測試血糖前，請先詳閱內附之所有說明書，並依指示用葡萄糖品管液做測試練習。請諮詢專業人員。

△注意：試片請小心存放，避免孩童拿取，瓶蓋及血糖試片誤食可能會造成窒息的危險。切勿吞食。若不慎吞入，請立刻送醫處理。

請隨身攜帶此說明書，以備不時之需。

關於本產品效能

IVD 本產品僅供體外測試，定量檢測指尖與其他採血部位（手掌）新鮮微血管全血的血糖值。本產品可提供專業人員或糖尿病患測量血糖值，不可作為糖尿病的最終診斷。

量測原理

本血糖儀是利用電化學生物感測技術製成，僅可與歐克博優血糖試片搭配使用。血糖試片上的酵素（葡萄糖去氫酶）與血液接觸時會產生一個微弱電流，電流的強弱會依檢體血糖多寡而變化，血糖儀即會依電流的強弱換算出您的血糖值，並於螢幕上顯示。

產品特性

血糖儀採用最新技術，量測簡易、舒適。血量僅需 ≥ 0.4 μL，並在 5 秒內顯示血糖值，讓您使用更加安心與方便。

△注意：為了測得最準確的血糖值，請勿使用其它廠牌的血糖試片或葡萄糖品管液測試。

△注意事項

- 您量測的血糖值僅供參考，不可作為糖尿病的最終診斷依據，請勿自行採取任何醫療措施，若有任何用藥疑問，請先諮詢專業人員。
- 如您遵照此使用說明書所述的所有說明操作，但血糖檢測結果與您身體感受的症狀不符時，請重複檢測，若第二次的檢測結果仍然相同，請馬上向專業人員諮詢。
- 若血液中含有高濃度的維他命 C(> 5.0 mg/dL) 或尿酸(> 8.0 mg/dL) 等還原物質時，可能造成量測不準確，請先諮詢專業人員後再測試。
- 在高海拔環境下（高於 3,402 公尺以上），量測值可能不準確。
- 請在 5°C ~45°C (41°F ~113°F) 的溫度範圍內量測。

△專業人員使用時特別注意：

- 請使用拋棄式採血針具，並限單次使用。
- 每一次測試結束後，應適當的清潔血糖機，去除感染源。
- 為不同病患進行檢測時，應更換手套。

△重要健康資訊：

- 請使用微血管全血或靜脈全血作為檢體，靜脈全血只限專業人員採集。
- 極度口渴或嚴重脫水時可能會造成昏迷或量測時出現低血糖值，如有上述症狀，其血糖測量值會不正確，請立即諮詢您的專業人員。
- 若已遵照本使用說明書的內容操作但血糖量測值與您感受的高、低血糖症狀不一致時，請諮詢專業人員。
- 若您的血糖檢測值低於 54 mg/dL 或高於 250 mg/dL（註一），但您沒有感受到高、低血糖症狀時，請重複血糖測試。如您的高、低血糖症狀或量測的血糖值持續低於 54 mg/dL 或超過 250 mg/dL 時，請儘快諮詢專業人員。

頁面 A：1. 了解您的血糖儀

2. 準備採血

3. 非指尖的多部位採血 (AST) 相關資訊

頁面 B：4. 血糖測試

5. 回讀記憶

6. 用歐克葡萄糖品管液校驗

7. 保養與保存

8. 訊息顯示與故障排除

9. 產品規格表

10. 連接藍芽和手機應用程式設定

- 嚴重低血壓病患、休克病人、糖尿病酮酸症或高血糖症、高滲透壓非酮性昏迷所致嚴重脫水等患者，其微血管的血糖值可能失真。重症患者不應使用血糖儀測試。
- 本產品之血容積比 (HCT，血液中紅血球的比例) 範圍為 10%~65%。當血容積比超過以上範圍時，量測結果可能不準確，請先詢問專業人員後再測試。
- 化合物：正常血液中的代謝物（例如尿酸），或因藥物產生的物質（如維他命 C 等），不會影響血糖量測值，但若血液中含有化合物超過下表限制濃度，可能會造成血糖檢測值不準確，請先諮詢專業人員。

化合物	經測試，血液中的化合物低於此濃度不會影響檢測值	化合物	經測試，血液中的化合物低於此濃度不會影響檢測值
Acetaminophen	8.0 mg/dL (0.53 mmol/L)	Hydroxyurea	3.0 mg/dL (0.39 mmol/L)
Ascorbic Acid	5.0 mg/dL (0.28 mmol/L)	Ibuprofen	50 mg/dL (2.42 mmol/L)
Aspirin	60 mg/dL (3.33 mmol/L)	Icodextrin	13 mg/dL (0.01 mmol/L)
Bilirubin	90 mg/dL (1.54 mmol/L)	L-dopa	10 mg/dL (0.51 mmol/L)
Cholesterol	500 mg/dL (12.9 mmol/L)	Maltose	900 mg/dL (26.3 mmol/L)
Creatinine	5.0 mg/dL (0.44 mmol/L)	Methyldopa	3.0 mg/dL (0.13 mmol/L)
Dopamine	2.0 mg/dL (0.11 mmol/L)	Pralidoxime Iodide	25 mg/dL (0.94 mmol/L)
EDTA	360 mg/dL (12.3 mmol/L)	Salicylate	60 mg/dL (4.34 mmol/L)
Galactose	900 mg/dL (50 mmol/L)	Tolazamide	100 mg/dL (3.21 mmol/L)
Genitisc Acid	5.0 mg/dL (0.32 mmol/L)	Tolbutamide	400 mg/dL (14.8 mmol/L)
Glutathione	53 mg/dL (1.72 mmol/L)	Triglycerides	2,000 mg/dL (22.6 mmol/L)
Haemoglobin	500 mg/dL (0.08 mmol/L)	Uric Acid	8.0 mg/dL (0.48 mmol/L)
Heparin	8,000 U/dL	Xylose	100 mg/dL (6.66 mmol/L)

- 詳細產品資訊請閱讀本產品血糖試片說明書。

註一：American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes-2024. Diabetes Care. 2024 Jan 1;47(Suppl 1):S111-S125.

1. 了解您的血糖儀

- 注意：1. 如有任何遺漏的品項，請將本包裝退回您的購買處。
2. 包裝視選購規格不同，內容物將有差異，實際內容物依彩盒標示為主。

試片插入口 / 試片退出鍵：

請於此處插入血糖試片，試片插到底後血糖儀會自動開機。

往前推可退出血糖試片。

S 鍵：

按此鍵可進入血糖儀設定。

螢幕：

顯示檢測結果和其他重要訊息。

電池匣：

您新購的血糖儀出廠前已裝入一顆新的電池（電池型號 CR2032）。

數據傳輸口：

可將存儲的數據記錄傳輸到電腦中進行查看和列印。

M 鍵：

記憶鍵，按一下可開機或執行本說明書所述之其它功能。

血糖儀

- 本產品藍牙功能為選配，型號說明：
- OK-8DLJHB：具備藍牙功能
 - OK-8DLJH：不具備藍牙功能

手握區：

拿取試片時請手握此處。

檢體吸入口：

當血液輕觸此端時，血液會自動吸入。


試片電極：

請由此端插入試片到血糖儀內。

確認窗：

檢測時血液必須完全覆蓋此區，才表示血量足夠。

試片

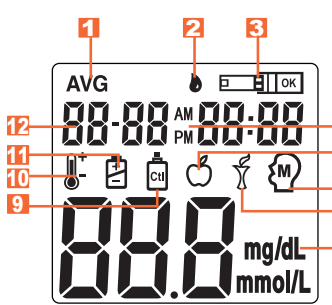

- AVG: 英文「日平均」的縮寫，當進入回讀平均時，伴隨 7, 14, 15, 21, 28, 30, 60 與 90 天的平均值顯示以做為平均提示。
- 血滴符號：當血糖試片插入後顯示，提示可以採血作血糖測試。
- 試片符號：當此符號出現表示，可以插入試片開始量測。
- 時間：12 小時制。
- 餐前符號。
- M: 英文「記憶」Memory 的縮寫，回讀記憶時顯示。
- 餐後符號。
- 量測單位：血糖儀出廠前預設單位為 mg/dL。

9. 品管液符號：當在此模式中，你的測試結果將不會被儲存在記憶體裏。

10. 溫度符號：當周圍環境溫度超出允測範圍時顯示，請先移機至 5°C ~45°C 溫度範圍內，放置 30 分鐘後等訊息消失再測試，若此訊息仍然無法消除，請與我們客服人員聯絡。

11. 電池符號：當電池耗弱時顯示以提醒您需更換電池。


12. 日期：顯示年月日

如何更換電池

您新購的血糖儀於出廠前均已先幫您裝入一枚 3V 鋰電池（電池型號 CR2032）。此電池約可做 1000 次測試（以一天三次血糖測試計算，約可用 12 個月），但實際電池壽命依據您使用的狀況而不同，建議您隨時有備用的電池在身邊，以備不時之需。

當螢幕顯示電池符號時，表示電力微弱。您仍可繼續使用，但請儘快更換新電池。

當螢幕上時顯示閃爍的「E-b」時，表示電力已用畢，必須立即更換新電池。

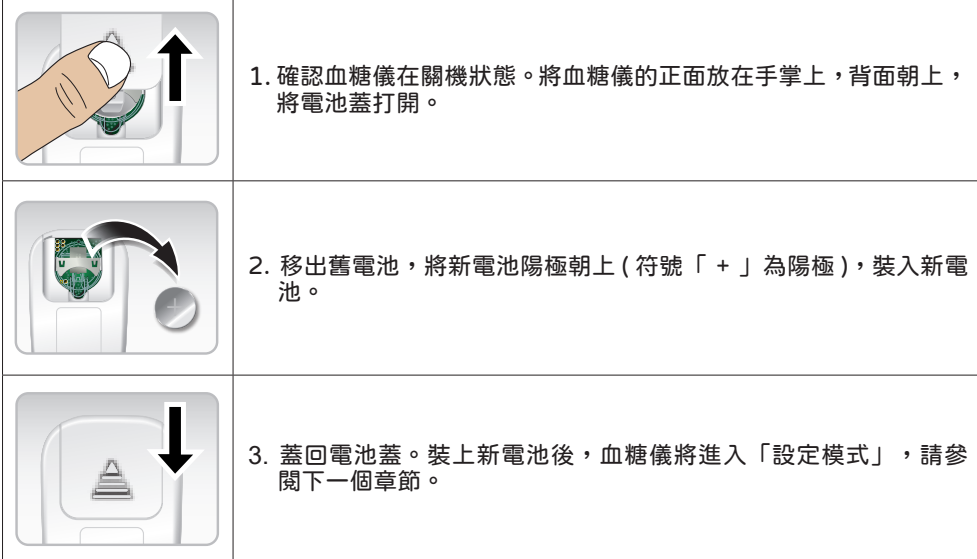

備註：

- 更換電池並不會造成您血糖儀內的記憶值改變或遺失，但您需要重新設定血糖儀的時間與日期。
- 請將電池放置於兒童無法取得的地方，以免發生誤食危險。如誤食電池，請立即就醫。
- 若長時間（例如 3 個月或更久）不準備使用本血糖儀時，請將電池取出存放，以免電池滲漏造成儀器毀損。
- 請依照台灣法規處理廢棄電池。



廢電池請回收

設定時間及日期

您的血糖儀在出廠前均已先幫您設定好時間與日期（台灣時區）、量測單位（mg/dL 或 mmol/L）、溫度顯示（°C），若您需要重新設定，請參閱以下步驟。

	1. 放入電池時，即進入設定模式，請跟著 "3. 設定年份"，開始設定您的血糖儀。
	2. 設定模式 血糖儀開機狀態下按一下 M 鍵三秒開機，再按一下 S 鍵（設定鍵），血糖儀自動進入設定模式。
	3. 設定年份 西元年碼開始閃爍，您可按 M 鍵（記憶鍵）調整正確年份，選定後按 S 鍵設定鍵確認。
	4. 設定月份 螢幕進入月份設定，此時月碼開始閃爍。您可按 M 鍵調整正確月份，選定後按 S 鍵確認。
	5. 設定日期 您可以按 M 鍵調整正確日期，選定後按 S 鍵確認。
	6. 設定小時 您可以按 M 鍵調整正確時間，選定後按 S 鍵確認。
	7. 設定分鐘 您可以按 M 鍵調整正確分鐘，選定後按 S 鍵確認。
	8. 選擇 mg/dL 或 mmol/L 當時間都設定完成後，血糖儀會進入量測單位的設定。您的血糖儀於出廠前均設定好量測單位為 mg/dL，此時 mg/dL 開始閃爍。若您想更改，可連續按壓 M 鍵 3 秒鐘來轉換單位顯示（mmol/L），選定後按一下設定鍵確定。
	9. 設定完成 所有設定完成，螢幕顯示 OFF 三秒後關機。

△注意：


- 您必須經歷年份、月份、日期、小時、分鐘等程序後，才能退出設定模式並關閉血糖儀。
- 本血糖儀提供二種量測單位選擇，以 mg/dL（毫克 / 百毫升）或 mmol/L（毫莫耳 / 升）其中一種單位顯示。出廠前的設定均為 mg/dL 以符合台灣使用習慣，使用錯誤的量測單位，可能因對檢測值的誤判而造成用藥錯誤，所以在您需要重新設定單位為 mmol/L 前，請先諮詢您的專業人員，再依照上述步驟設定。
- 在設定模式下，如沒有操作 60 秒，血糖儀會自動關機。
- 您必須在記憶模式下才可以查閱各平均值數據，最近的紀錄將從 7, 14, 15, 21, 28, 30, 60 和 90 天開始依序回讀。

2. 採血配件

調節式採血筆

請利用採血筆與採血針來採集指尖血液。

衛署醫器陸輸壹字第 001806 號
衛署醫器陸輸壹字第 000640 號
衛署醫器陸輸壹字第 001825 號
衛部醫器陸輸壹字第 002655 號

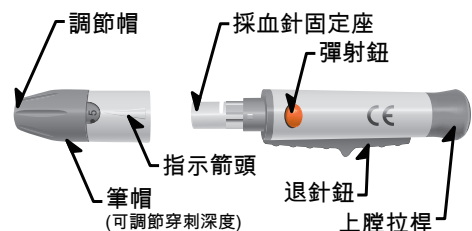

採血針 針蓋

衛署醫器陸輸壹字第 001295 號
衛署醫器陸輸壹字第 000353 號

△採血筆與採血針注意事項

- 每個採血針僅能使用一次，請勿重複使用。
- 請保持採血筆與採血針的清潔。
- 請小心使用採血針以免刺傷他人，並依醫療器材廢棄物法規棄棄用過的採血針。
- 採血筆和針樣式圖僅供參考，實際依彩盒標示為主。

3. 非指尖的多部位採血 (AST) 相關資訊

重要事項

進行非指尖的多部位採血 (AST)，有以下限制。進行 AST 前請先洽詢專業人員。

何謂 AST？

非指尖的多部位採血 (AST)，表示使用非指尖的身體其它部位來檢驗您的血糖值。本血糖儀可讓您在手掌部位採血來檢驗血糖值，其量測的血糖值與指尖血糖值相符。

AST 優點為何？

指尖採血時，因指尖佈滿感覺神經元，故痛感較敏銳。身體的其它部位，因神經元並不密集，因此較不會感到疼痛。

何時採用 AST？

食物、藥物、生病、壓力與運動都會影響您的血糖濃度。且指尖血液會較其它部位的微血管血液更快反應這些變化。因此，您在用餐、運動、服藥後，請勿使用 AST 採血來測試您的血糖值。



您僅可在下列情境下進行 AST 採血測試：

- 飯前或禁食後（距上次進食 2 個小時以上）。
- 注射胰島素後超過 2 個小時。
- 運動後超過 2 個小時。

在下列情境下請勿用 AST 採血測試：

- 您近來的血糖值偏低或偏高。
- 您的血糖測試結果與您身體感受到的高、低血糖症狀不一致。
- 您近期的血糖測試結果經常上下波動。
- 您目前懷孕。

請不要僅依據一次血糖檢測的結果就變更您的服藥或療法，千萬不要忽視任何高血糖或低血糖症狀，若您的血糖檢測結果與您身體感覺的症狀不符時，請再用指尖血來覆檢您的血糖值。

如何增加非指尖採血的準確度？

採血前，請先按摩採血部位 20 秒以上以刺激血液流動，AST 的採血量多寡會對檢測的準確度有重大影響。如未按壓就直接採血，量測結果會與指尖血有顯著差異。

注意：為增加非指尖採血的準確度，採血前請先按摩欲採血部位 20 秒以上。


4. 血糖測試

測試前準備


操作步驟




1 洗手並擦乾。

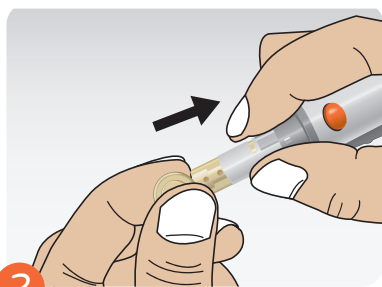


2 將採血筆蓋轉開，將採血針裝入置針座內。

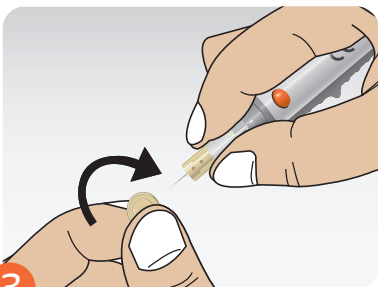


3 將採血針的針蓋轉開，把採血筆蓋裝回。

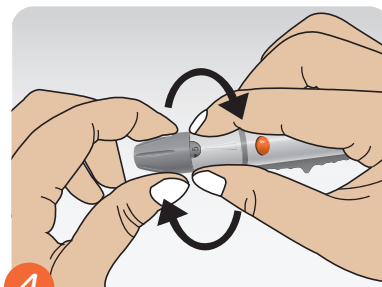

4 調整採血筆的採血深度。

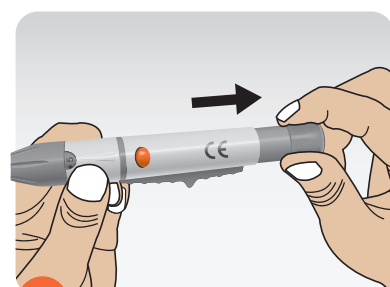


5 將採血筆的彈拉柄往後拉，直到聽到一聲喀嚓聲響後放開手。

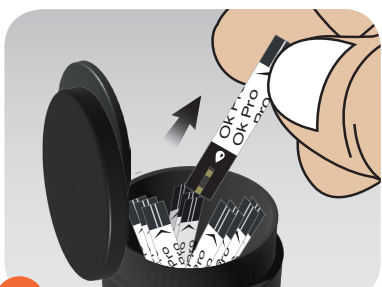

6 從試片罐取出試片。取出後請立刻將試片罐蓋上。




7 將試片插入血糖儀的試片插入口。

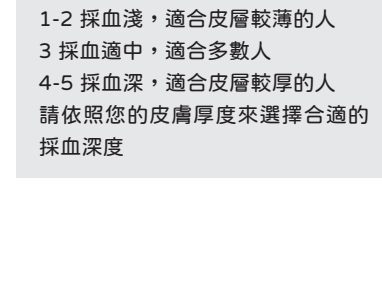


8 確認血滴符號閃爍。




9 按 M 鍵可以切換餐前模式 (AC) 和餐後模式 (PC, 餐後 2 小時)。

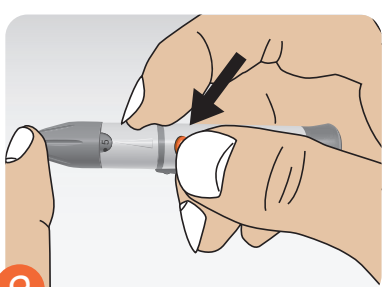

10 將備妥的採血筆輕按壓於手指尖，按下彈射鈕將採血針彈出採血。

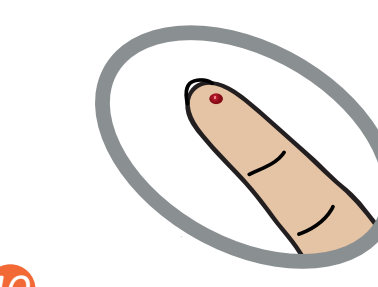

11 擠壓出少許血液，形成弧形滴狀。請勿過度擠壓以避免組織液被擠出影響檢測值。

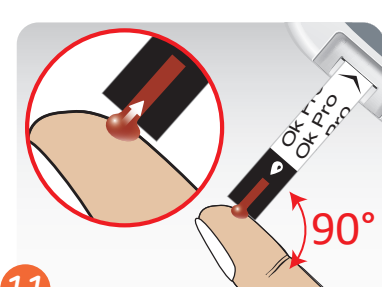


12 試片吸入口輕觸待檢的血液，確認血液填滿視窗，直到血糖儀發出一聲短響。




13 您的血糖值將在 5 秒後顯示在螢幕上。血糖值僅供您參考，關於適合您的血糖控制目標與醫療措施，皆請諮詢專業人員。



14 將退片鍵往前推，可退出血糖試片。試片退出後血糖儀自動關機。

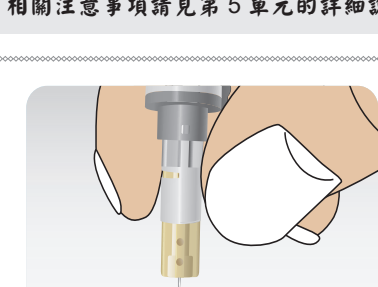

15 將採血筆筆蓋旋下，針尖插入採血針針蓋。

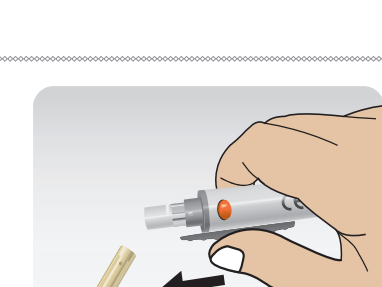

16 將退針鈕往前推，採血針將自動退出。請依醫療器材廢棄物法規丟棄採血針。

注意：一般量測均在品管液模式中進行測量 (品管液模式：螢幕出現品管液符號)，相關注意事項請見第 5 單元的詳細說明。

保養和保存

為了避免污染或弄髒血糖儀與試片，測試前請先清洗雙手並擦乾後再開始操作。

清潔

避免摔碰儀器，保持儀器的乾燥清潔，將儀器安置於攜帶包內存放即可。若血糖儀外觀髒污需要清潔時，請用清水或柔性清潔劑沾溼棉布擦拭，然後以乾布擦乾即可。切勿用水沖洗。勿用任何有機溶劑擦拭儀器。您的血糖儀為精密儀器，請小心操作。本產品已完成 PDI Super Sani-Cloth Germicidal Disposable Wipe 清潔確效。

儲存與運送注意事項：

1. 血糖儀

- 儲存與運送條件：-20~50°C (-4~122°F)，相對溼度 10~90% 以下環境。
- 請存放血糖儀於攜帶包內，避免摔落或重擊。

- 避免陽光直射或存放在高溫度的環境下。
- 每次測試結束後，應適當清潔血糖機，去除感染源。
- 為不同病患檢測時，應更換手套。

2. 血糖試片

- 儲存與運送條件：2°C~41°C (35.6°F~105.8°F)，相對溼度 10~90%。切勿冷藏或冷凍。
- 僅可將血糖試片儲存在原裝試片罐內，切勿將它分裝至其它容器內。
- 請將血糖試片存放在涼爽、乾燥處。避免太陽直接照射。
- 將試片自罐中取出後，請立刻蓋回罐蓋並蓋緊。
- 請以乾淨的雙手接觸血糖試片。
- 血糖試片取出後，請立刻使用。
- 切勿以任何方式彎曲、切割、或破壞血糖試片。
- 試片罐請小心存放，避免孩童拿取，瓶蓋及血糖試片誤食可能會造成窒息的危險。若不慎吞入，請立刻送醫處理。

3. 葡萄糖品管液

- 儲存與運送條件：20°C~26°C (68~78.8°F) 相對溼度 10~90% 之間。切勿冷藏或冷凍。

8. 訊息顯示與故障排除

以下為血糖儀在操作過程中可能出現的顯示訊息整理表，閱讀以下的訊息與故障排除方式可讓您更加瞭解本產品。當血糖儀螢幕上出現任何顯示訊息時，請先對照下表並依指示排除故障。若您遇到其他顯示訊息但並未表列於下時，請致電我們客服人員或洽詢您當地經銷商。

訊息顯示	提示意義	處理辦法
	全顯示	每次開機時均會顯示，請檢查是否螢幕內的每個數字與符號均正常顯示。若有任何數字或符號無法顯示或顯示不完整時，請與我們客服人員聯絡。
	移動的試片	插入試片提示，請取出血糖試片插入血糖儀內。
	移動的血滴	滴血提示，請將試片吸入孔輕觸待測檢體，檢體會自動吸入並進行測試。
	測試中	5 秒後顯示結果
	血糖值非常高，高於 700 mg/dL (38.9 mmol/L)。	若此訊息出現但與您身體感受到的症狀不符時，請檢查 1. 血糖測試步驟是否正確 2. 用葡萄糖品管液測試，確認血糖儀與試片正常
	血糖值非常低，低於 5 mg/dL (0.3 mmol/L)。	3. 重複血液測試 若第二次的血糖檢測值仍為「Hi」或「Lo」，請馬上與專業人員聯絡。

9. 產品規格表

型號	OK-8DLJH(B)
測試技術	電化學生物感測技術
血液樣本	新鮮微血管全血
樣本體積	≥ 0.4 μL
測試時間	5 秒
測試範圍	5~700 mg/dL (0.3~38.9 mmol/L)
血容積比範圍	10%~65%

多部位採血功能 (AST)	手摺
操作環境	5°C~45°C (41~113°F), 10~90% R. H.
記憶容量	1,000 筆測試值 (含時間與日期)
平均記憶	7, 14, 15, 21, 28, 30, 60 與 90 天
電源	3 伏特鋰電池一顆 (電池型號 CR2032)
電池壽命	1,000 次，大約一年 (以每天進行三次測試估計)
待機時間	開機後 3 分鐘無動作，血糖儀自動關機
血糖儀尺寸	長 79 x 寬 45 x 高 22 mm
血糖儀重量	36g 公克 (含電池)

5. 回讀記憶

您的血糖儀可自動儲存 1000 筆測試值，並可讓您依序回讀最新到最舊的檢測值，當記憶體已滿時，最舊一筆的記憶值將被覆蓋掉。血糖儀亦會自動計算您餐前和餐後 7, 14, 15, 21, 28, 30, 60 與 90 天血糖平均值。

	步驟 1. 進入記憶模式 按 M 鍵一下 3 秒開機，再按一下 M 鍵，進入記憶回讀模式。
	步驟 2. 回讀記憶值 在任何時間按 M 鍵可進入記憶模式，您可按 M 鍵依序回讀最近測量 7, 14, 15, 21, 28, 30, 60 與 90 天血糖平均值。 如欲顯示各平均值中的餐前或餐後測量值請按 S 鍵，結束請再次按 M 鍵。 依次顯示完畢數，畫面將返回到單筆記憶值。
	步驟 3. 回讀單筆記憶值 在 90 日的平均值之後，螢幕顯示您最近一次測試的血糖值，伴隨著測試日期及時間。您可按 M 鍵，依序回讀您最新到最舊的血糖值。 按記憶鍵每次依次會顯示您最近的 1000 筆量測值。當記憶體已滿時，最舊一筆的記憶值將被覆蓋掉。
	步驟 4. 離開記憶模式 在回讀記憶時，您可隨時按記憶鍵 3 秒鐘關機。

6. 用歐克葡萄糖品管液校驗

衛署醫器製字第 002597 號

此品管液是用來檢驗您的歐克博優血糖儀與歐克博優血糖試片是否運作正常，建議您定期做品管液測試，以確保您的血糖儀與血糖試片運作正常。

何時要做品管液檢測？

1. 當您新購血糖儀，尚未開始使用時。
2. 當您新購血糖試片，尚未開始使用時。
3. 當您懷疑血糖儀或血糖試片的運作不正常時。
4. 當您想以品管液取代血液做操作練習時。
5. 當您對血糖檢測結果有疑慮的時候。
6. 當您的試片曾經暴露於異常環境下 (陽光直曬或極度高溫或高濕)，懷疑血糖試片可能毀損時。
7. 當血糖儀不小心從高處掉落時。

△ 品管液注意事項

1. 未開封之有效期標示於瓶身標籤，請勿使用過期的品管液校驗。
2. 品管液使用完畢後請馬上將瓶蓋蓋回旋緊。
3. 為避免品管液的瓶口受到汙染影響檢測值，測試前請先均勻搖晃瓶身，開瓶後請先用衛生紙擦掉第一滴品管液，擠出第二滴品管液再開始測試。
4. 請在室溫 20°C~26°C 環境進行品管液測試。

備註：
• 葡萄糖品管液的範圍印刷於您的試片罐標籤上，其範圍會隨試片批號不同而修正，測試前請先確認您的試片批號與品管液範圍。
• 本品管液範圍是用來檢驗您的血糖儀與試片是否運作正常，並非您的血糖值或目標值，請勿混淆，若有任何用藥疑問，請諮詢專業人員。

品管液測試步驟

1. 取出一片血糖試片，插入血糖儀，血糖儀自動開機。
2. 血滴符號 () 顯示後，按 S 鍵一下，顯示「」，代表已啟動品管液測試，則此筆測試結果不會儲存在血糖儀記憶中。如要取消品管液模式，請再按一下 M 鍵，可以切換餐前模式 () 和餐後符號 ()。
3. 取出品管液，均勻搖晃瓶身，開瓶後用衛生紙先擦掉第一滴品管液，再擠出另第一滴品管液於瓶蓋或其他不吸水的乾淨平面上。
4. 將此滴品管液輕觸試片的吸入口，品管液自動吸入後，血糖儀會開始測試並倒數 5 秒後顯示檢測結果。
5. 對照檢測結果與試片罐標籤上的品管液範圍，確認檢測值是否落於品管液範圍內。

備註：
1. 當您使用品管液檢測時，請務必以品管液模式操作；以確保此測試結果不儲存於量測記憶中。
2. 為測得準確的品管液檢測值，請勿將品管液直接滴在試片上。
3. 若檢測結果落於品管液範圍外，請重複檢測，若第二次的檢測結果仍然落於品管液範圍外時，您的血糖儀或試片可能發生異常，請勿進行血糖測試，並馬上連絡您當地的經銷商。

10. 連接藍芽和手機應用程式設定

請先至您手機系統商提供程式下載之位址選 "OK GlucoBlue" app，開啟程式後如下表操作。

	1. 登入 請先鍵入您註冊的信箱和密碼		5. 血糖儀配對連結完成後，資料會自動下載。
	2. 開啟血糖儀藍芽模式，點擊 app 選單中的「藍芽列表」。		6. 下載完成 當資料傳輸完畢血糖儀會自動關機。
	3. 請按繼續 血糖儀開機狀態下，長按 M 鍵六秒後顯示 BLE，表示開啟藍芽功能。		7. 讀取紀錄 數據結果將會顯示在首頁中
	4. 開始手機和血糖儀配對 第一次配對，程式系統會提示一組對接碼，請依序鍵入手機顯示窗格，血糖儀此時螢幕固定顯示 "bLE"		8. 量測紀錄 畫面將依序從您最近記錄開始顯示。 * 您可以分別在「歷史資訊」欄、「血糖日記」欄中查閱單項量測值或周間曲線變化狀況。
△ 注意個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守個人資料保護法之規範。			